

ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ

ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12 ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12



**ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ**

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ

ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12 (КАТ.№ P-731) - набор реагентов одноразового использования предназначен для идентификации энтеробактерий по 12 биохимическим признакам до вида. Обеспечивает дифференциацию наиболее часто встречающихся типичных представителей семейства *Enterobacteriaceae*.


При необходимости могут применяться дополнительные тесты.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стандартизует процесс идентификации энтеробактерий
- Обеспечивает надежность идентификации
- Сокращает сроки исследования и трудозатраты
- Обеспечивает комфорт в работе
- Долговечность в сравнении с классическими пробирочными средами (срок годности 1 год)
- Использование полистироловых 96-ти луночных планшетов с горизонтальными разборными стрипами с сухими субстратно-индикаторными средами с возможностью исследования по одной культуре. Набор рассчитан на 24 анализа
- Удобная комплектация набора, включающая готовые к немедленному использованию физиологический раствор для приготовления микробной суспензии, дополнительные реагенты и вазелиновое масло
- Стабильность после вскрытия стрипов со средами, физ. раствора, дополнительных реагентов до конца срока годности набора
- Наличие цветового указателя, флаконов-капельниц для реактивов и крышки-капельницы для масла
- Наличие ссылки в инструкции по применению на использование контрольных штаммов для контроля специфической активности набора
- Для процесса интерпретации результатов в состав набора входит каталог кодов, а также может быть предложено программное обеспечение
- Возможность автоматического учета результатов и идентификации. Набор адаптирован и может использоваться в программах «Микроб-Автомат», «Микроб-2» и фотометрах типа IEMS-reader, Multiscan Ascent, Thermo-Fischer Scientific

СХЕМА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДС-ДИФ-ЭНТЕРО-12

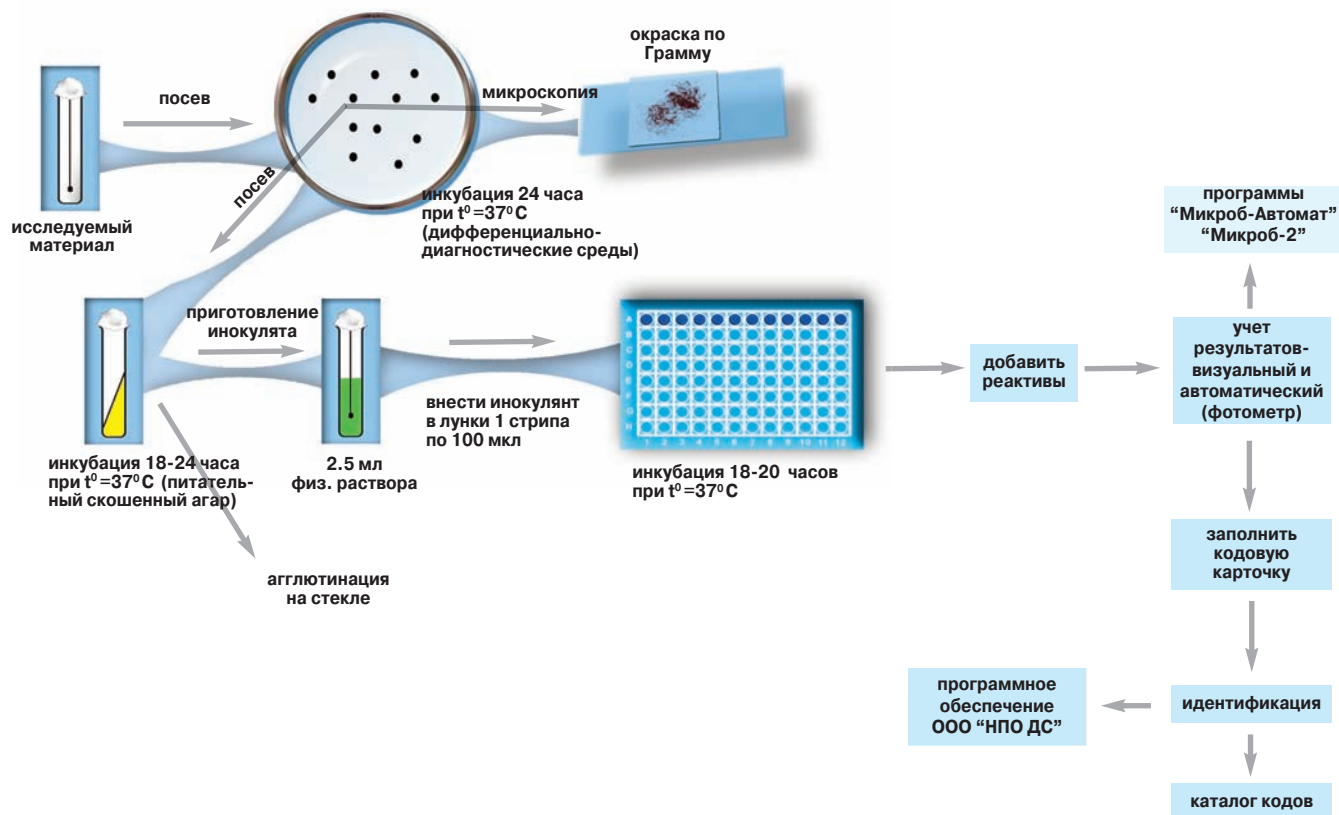


ЦВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ

НАБОР СОДЕРЖИТ 12 ТЕСТОВ

тест	Цитрат натрия	Сероводород	β -галакт	Фенил-аланин	Лизин	Орнитин
номер лунки	1	2	3	4	5	6
+						
-						

тест	Индол	Малонат натрия	Мочевина	Сорбит	Инозит	АМК
номер лунки	7	8	9	10	11	12
+						
-						



Департамент продаж:
603001 Н. Новгород, ул. Нижне-Волжская наб., 9
Тел./факс: (831) 467-82-02, 467-82-15,
467-82-16, 467-82-17
Бесплатная линия 8-800-555-0300
E-mail: selling@npods.ru
www.npods.ru